

Arbeiten mit dem Ü-Stand AB  
workflow with the transfer stand AB

Art.no. 06-216280

Anleitung  
instruction

Schritt 1: Den 3D-Gelenksupport vom Reference AB Gesichtsbogen lösen und am Ü-Stand AB fixieren

Step 1: Remove the 3D-joint support from the Reference AB Face bow and mount it into the transfer stand AB.



Schritt 2: Distanzsockel mit Montageplatte unter der Bissgabel einsetzen.  
Darauf achten, dass zwischen der Montageplatte und der Bissgabel genügend Platz für Gips ist. Jenen Distanzsockel wählen der am Besten passt.

Step 2: Put the distance block and the mounting plate under the bite fork.  
Between the mounting plate and the bite fork should be enough space for the plaster. Choose the distance block which fits best.



Schritt 3: Den Spalt mit Gips füllen und aushärten lassen !

Step 3: Fill the gap with plaster and wait until its hardened !



Schritt 4: Wenn der Gips ausgehärtet ist, den 3D – Gelenksupport entfernen

Step 4: After the plaster is hardened remove the 3D – joint support




Schritt 5: Einsetzen der Bissgabel im Artikulator

Step 5: Mount the bite fork into the Articulator



Schritt 6: Oberkiefermodell einsetzen. Darauf achten, dass die Kontur der Zähne genau auf die Abdrücke der Bissgabel passt.

Step 6: Put in the upper jaw model. Take care that the model fits exactly to the impressions from the bite fork.

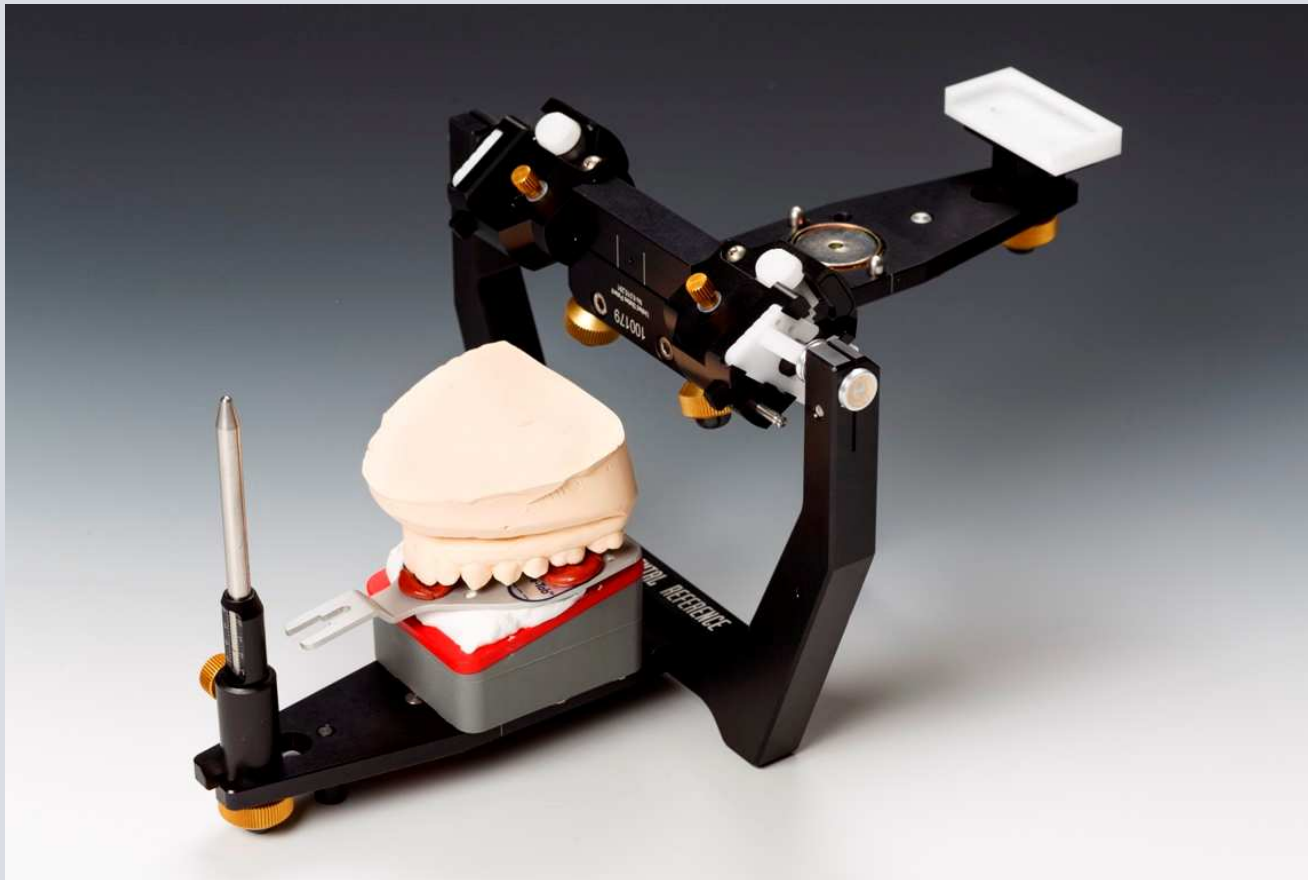

Schritt 7: Den Inzisalstift auf "0" stellen.

Den Distanzsockel wählen der am Besten passt.

Den Spalt zwischen Montageplatte und OK - Model mit Gips ausfüllen.

Step 7: Check if the mark of the incisal pin is on "0".

Choose the distance block which fits best and fill the gap between the upper jaw model and the distance block with plaster.



Zum Montieren des UK – Models der Bedienungsanleitung  
"Reference" Kapitel 3.4 ff folgen.

For mounting the lower jaw model please follow the Reference  
instruction manual chapter 3.4 ff.